

Pulssikädet

Pulssikäden avulla on helppo opettaa epäsäännöllisen pulssin tunnistamista.

Sydänyhteisön käytössä on viisi pulssikättä. Ne on tarkoitettu kaikkien sydänpiirien ja -yhdistysten käyttöön. Pyydä lainaan ensisijaisesti oman alueesi pulssikättä. Käytettävissä on myös Sydänliiton ja muiden alueiden pulssikädet.

KÄSI 1: Sydänliitto Etelä-Suomen Alue


KÄSI 2: Savon Sydänaalue

KÄSI 3: Keski-Suomen Sydänpiiri


KÄSI 4 ja 5: Sydänliitto



Pulssikäsi - pikaohje

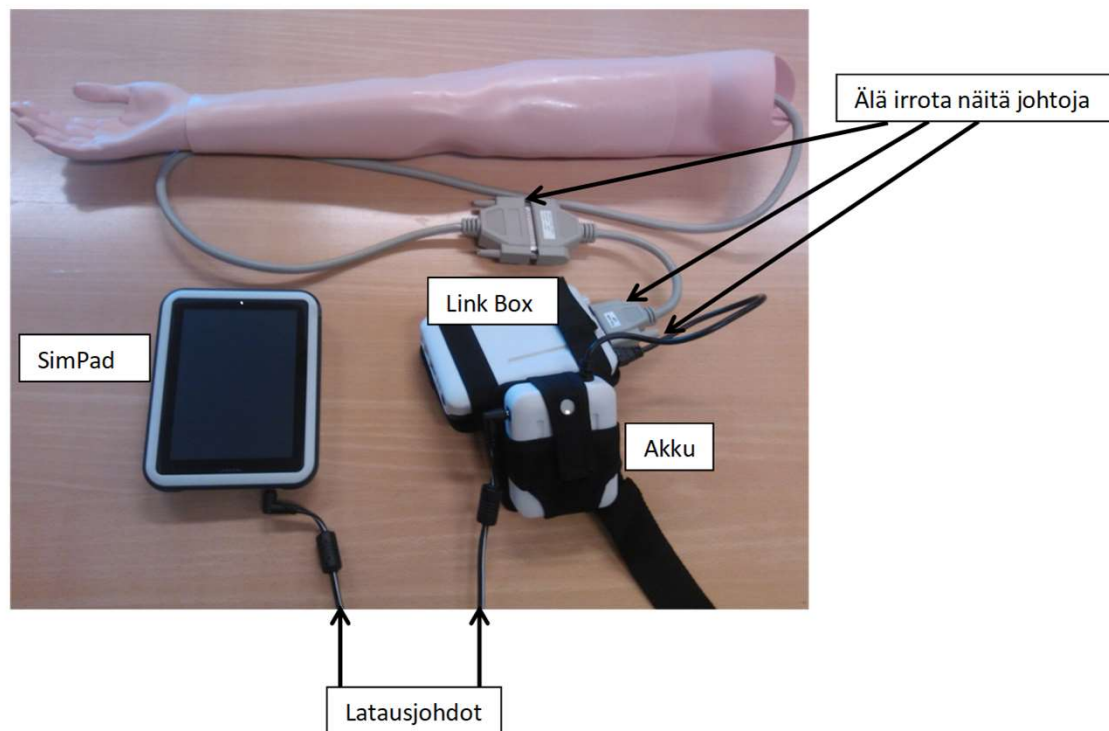

Pulssikäsi - pikaohje

1. Käynnistä SimPad ja Link Box. Odota, että Link Boxin vihreä valo vaihtuu siniseksi. 
2. Valitse "Manual mode"
3. Paina "Select theme", valitse alin "SimNewB" ja sitten "SimNewB AAP default". Paina OK. Session nimellä ei ole väliä.
4. Valitse vasemmasta valikosta "L4"
5. Paina keskeltä "Peripheral pulse Absent"
6. Paina ihmishahmon kuvaa. Säädä peripheral pulse "Strong", paina ACTIVATE.

Pulssikäsi - pikaohje

Sinusrytmi – eteisvärinärytmi - lisälyönnit

1. Näytössä on oletuksena sinusrytmi, HR 140.
2. Voit säätää syketasoa painamalla "HR". Valitse haluamasi syketaso ja paina ACTIVATE.
3. Eteisvärinärytmin saat painamalla ekg-kuvaketta, josta avautuu valikko "Heart rhythm". Paina "Show all rhythms". Valitse "AFib." ja paina ACTIVATE.
4. Lisälyönnit saat painamalla ekg-kuvaketta, josta pääset "Heart rhythm" -valikkoon. Paina sinusrytmiä kaksi kertaa nopeasti, jolloin avautuu valikko, josta voit valita "Extrasystoles". Valitse PVC uni, säädä frekvenssi "Freq" -kohtaan.

Pulssikäsi - pikaohje

Sulkeminen

1. Paina "Menu" – "Quit"
2. Paina SimPadin virtapainikkeesta, valitse "SimPad &Link Box", jolloin sekä SimPad että Link Box sammuvat.

Muuta huomioitavaa pulssikädestä

- Älä paina liian kovasti palpoitavaa kohtaa (ranne) ettei pulssiyksikkö vaurioidu.
- Puhdista pulssikäsi pyyhkimällä se pehmeällä, hieman kostutetulla liinalla ja miedolla saippualla. SimPadin voi puhdistaa nukkaamattomalla liinalla (esim. silmälasien puhdistusliina).
- Älä pura laitteistoa. Johtoja ei siis tarvitse irrottaa toisistaan.
- Lataa sekä SimPad että akku käytön jälkeen, niin pulssikäsi on käyttövalmis seuraavalle käyttäjälle.
- Jos yhteys SimPadin ja Link Boxin välillä ei toimi (sininen valo ei syty Link Boxiin):
 - Tarkista asetukset, "System settings". Onhan WiFi päällä? Voit yrittää myös sieltä yhteyden muodostusta: "Connect for Link Box"
 - Yhteys SimPadin ja Link Boxin välillä toimii langattomasti. Jos samassa tilassa on monta pulssikästä tai yhteys ei jostain muusta syystä toimi, voit yrittää yhteyden muodostamista verkkojohdon avulla (musta, mukana laukussa, kts. kuva).